



เก้าอี้นั่งอาบน้ำ พับเก็บติดผนัง (BW4145)


วิธีการติดตั้ง

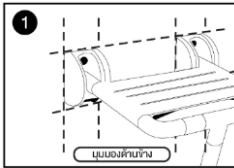



ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่จะเจาะรูยึดฐานเก้าอี้

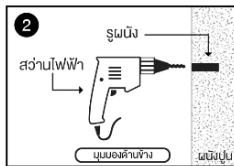


เจาะรูด้วยสว่านไฟฟ้า

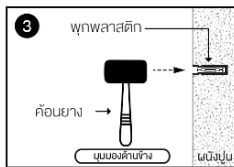

ใช้ค้อนยางตอกพุกลงไปให้เสมอกับพื้น

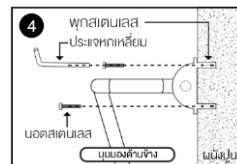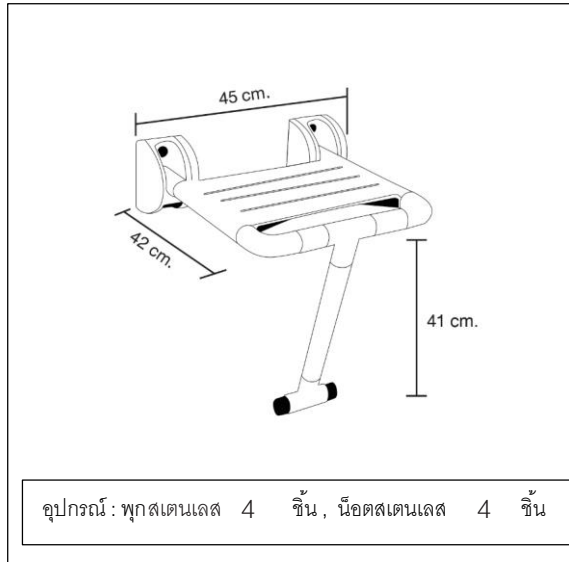

ร้อยน็อตผ่านเป็นฐานที่ใช้ยึดเก้าอี้ แล้วขันน็อตให้แน่นกับตัวพุก

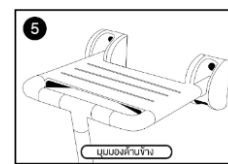

ตรวจสอบจุดขันน็อตให้ครบทุกจุด พร้อมทดสอบความแข็งแรง

ชื่อสินค้า : เก้าอี้นั่งอาบน้ำ พับเก็บติดผนัง (BW4145)

ขนาดบรรจุ : 1 ชั้น

วิธีการใช้งาน : ใช้สำหรับการพุงตัวกั้นลื่น

คำแนะนำ

1. ควรติดตั้งสินค้าบนพื้นที่ที่มีความแข็งแรง และเรียบเสมอกัน
2. ควรยึดน็อตให้ครบทุกตำแหน่งและขันให้แน่นทุกจุด
3. การทำความสะอาดควรใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสะอาดบิดให้หมาด เช็ดทำความสะอาด
4. ควรยึดน็อตกับพุกสแตนเลสให้แน่นทุกตำแหน่ง

คำเตือน

1. ใช้ในการช่วยพุงตัวเท่านั้น ห้ามโหนราวโดยตรง
2. ห้ามใช้น้ำยาที่เป็นกรด - ด่าง หรือสารเคมีเข้มข้น สัมผัสหรือเช็ดทำความสะอาด
3. ห้ามใช้แปรงที่มีขนแข็งหรือหยาบ ในการทำความสะอาด รวมถึงห้ามของมีคมขีดขีด
4. ห้ามใช้สินค้าผิดวิธี
5. ห้ามแก้ไข หรือดัดแปลงสินค้าโดยเด็ดขาด

ประเทศที่ผลิต : ประเทศไทย

วัน เดือน ปี ที่ผลิต :

ราคา : ระบุ ณ จุดขาย (บาท)

บริษัทที่ผลิต : บริษัท เดคอร่า แคร่ จำกัด

17/30 ม.7 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150